



Mouth Guards for single use:  
Bocal para Endoscopia

Aprovado pela Anvisa. RE 2372, DOU 120, de  
30/06/25. Registro nº 82517920002

Resp. técnico: Roberto Sampaio de Souza

CRQ IV Nº 04129506

Produto de uso único (Recomendação do Fabricante)

Prazo de validade: 3 anos

Produto estéril - Óxido de Etileno

Não reprocessar - Pronto uso



### Indicação

O Bocal para Endoscopia é usado para proteger o tubo de inserção do endoscópio e os dilatadores esofágicos de serem mordidos pelo paciente. Ele é feito de plástico, descartável, estéril, com ou sem tira, adequado para adultos e deve ser colocado na boca do paciente, sendo preso por uma tira isenta de látex colocada ao redor do pescoço do paciente.

### Orientações / Precauções

- ▶ Esterilizado por Óxido de Etileno, não-tóxico e não-pirogênico.
- ▶ Produto de uso único e destruí-lo após o uso.
- ▶ Deve ser armazenado em um local fresco, seco, bem ventilado e limpo.
- ▶ Deve ser utilizado pelo médico treinado.

### Instruções de uso

- ▶ Solte um lado da tira do Bocal para Endoscopia antes de posicioná-lo na boca do paciente;
- ▶ Coloque o Bocal para Endoscopia na boca do paciente;
- ▶ Passe a tira ao redor do pescoço do paciente e prenda-a de volta ao Bocal.