

**Mouth Guards for single use:
Bocal para Endoscopia**

Registro ANVISA nº: 80633660003

Resp. técnica: Lais Grenda Harnisch. CRF-PR 35746

Produto de uso único (Recomendação do Fabricante)

Prazo de validade: **3 anos**

Produto estéril - Óxido de Etileno

Não reprocessar - Pronto uso

**Indicação**

O Bocal para Endoscopia é usado para proteger o tubo de inserção do endoscópio e os dilatares esofágicos de serem mordidos pelo paciente. Ele é feito de plástico, descartável, estéril, com ou sem tira, adequado para adultos e deve ser colocado na boca do paciente, sendo preso por uma tira isenta de látex colocada ao redor do pescoço do paciente.

Orientações / Precauções

- ▶ Esterilizado por Óxido de Etileno, não-tóxico e não-pirogênico.
- ▶ Produto de uso único e destruí-lo após o uso.
- ▶ Deve ser armazenado em um local fresco, seco, bem ventilado e limpo.
- ▶ Deve ser utilizado pelo médico treinado.

Instruções de uso

- ▶ Solte um lado da tira do Bocal para Endoscopia antes de posicioná-lo na boca do paciente;
- ▶ Coloque o Bocal para Endoscopia na boca do paciente;
- ▶ Passe a tira ao redor do pescoço do paciente e prenda-a de volta ao Bocal.

Importador: Lever Medical Materiais Hospitalares Eireli - CNPJ: 40.758.730/0001-70

End: Rua Teodoro Sampaio, 1020 - sala 1109 Pinheiros, São Paulo, SP, 05406-050

Telefone: +55 11 95592-5137 - Email: comercial@levermedical.com.br

Responsável técnico: Márcio Cerqueira CRF-SP105680

Para conhecer mais
produtos e instruções de uso
www.levermedical.com.br